

Scegli la **SICUREZZA**

Scegli la **SEMPLICITÀ**

Scegli **ZERO**



Gestire il campione
bioptico in modo
SEMPLICE e SICURO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	VOLUME CONTENITORE	VOLUME FORMALINA	TAMPONE FOSFATO	VOLUME TOTALE FORMALINA 4%
6011	Zero 60 A tappo trasparente	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6012	Zero 60 A tappo arancio	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6013	Zero 60 A tappo azzurro	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6014	Zero 60 A tappo giallo	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6015	Zero 60 A tappo rosa	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6016	Zero 60 A tappo verde	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6017	Zero 60 A tappo grigio	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6018	Zero 60 A tappo lilla	48 pezzi	60 ml	10 ml	10 ml	20 ml
6001	Zero 60 B tappo trasparente	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6002	Zero 60 B tappo arancio	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6003	Zero 60 B tappo azzurro	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6004	Zero 60 B tappo giallo	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6005	Zero 60 B tappo rosa	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6006	Zero 60 B tappo verde	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6007	Zero 60 B tappo grigio	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
6008	Zero 60 B tappo lilla	48 pezzi	60 ml	20 ml	-	20 ml
15001	Zero 150 C tappo trasparente	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15002	Zero 150 C tappo arancio	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15003	Zero 150 C tappo azzurro	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15004	Zero 150 C tappo giallo	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15005	Zero 150 C tappo rosa	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15006	Zero 150 C tappo verde	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15007	Zero 150 C tappo grigio	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
15008	Zero 150 C tappo lilla	24 pezzi	150 ml	60 ml	-	60 ml
50001	Zero 500 D tappo trasparente	4 pezzi	550 ml	115 ml	115 ml	230 ml
50002	Zero 500 P trasparente	4 pezzi	550 ml	115 ml	115 ml	230 ml



Meccanica GM s.r.l. - Divisione Medica
Via Barca snc - 600125 Loreto (AN), Italy
Tel. 071 970727 - Fax 071 976440
medical@meccanicagm.com - www.prodottozero.com






SICURO, grazie alle sue caratteristiche uniche



ZERO, con il suo **“CICLO CHIUSO”** soddisfa le normative sull'uso delle sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro




SEMPLICE come avvitare e svitare il tappo di un barattolo

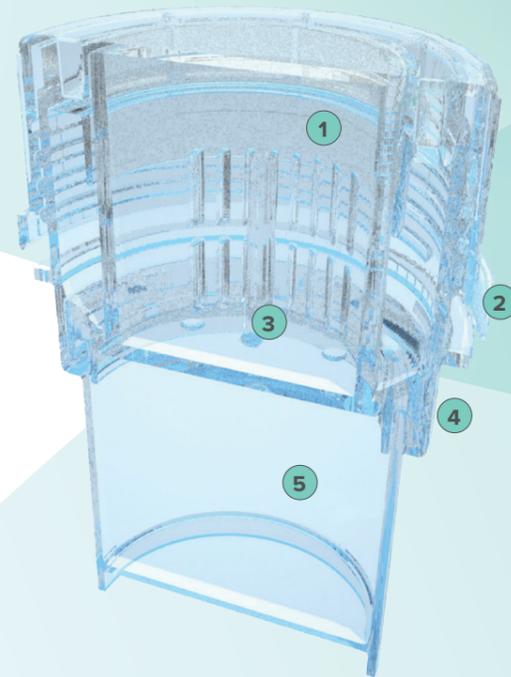

ZERO 60 A


- 1. Cestello discensore** per deposito biopsia
- Permette il **bloccaggio del tappo** del contenitore. Un'apertura "anomala" prima dell'arrivo in laboratorio sarebbe immediatamente rilevata a causa della rottura del sigillo.
- 3. Perno per distacco** biopsia
- 4. Fornita con 10 ml di tampone** fosfato per il risciacquo delle biopsie
- 5. Camera ermetica** contenente 10 ml di formalina

*Versione **ZERO 60 B** fornita senza tampone fosfato nella parte superiore e contenente 20 ml di formalina nella camera ermetica*

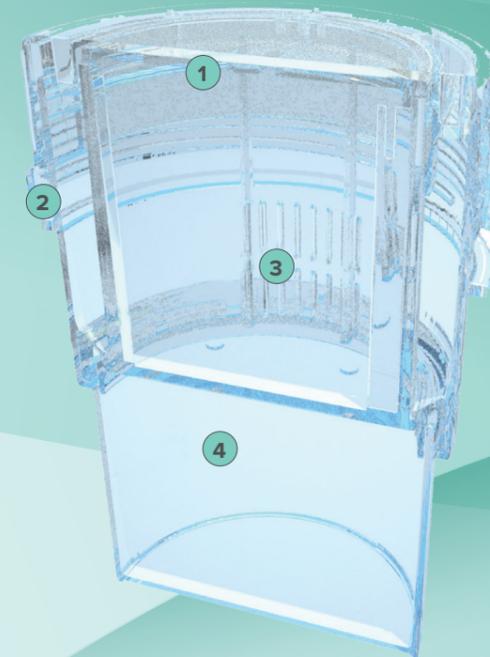

ZERO 150 C

- 1. Coperchio di chiusura** del cestello discensore
- 2. Sigillo di sicurezza**
- 3. Discensore per deposito** biopsia o inserimento organizzato fino a 4 cassette
- 4. Camera ermetica** contenente 60 ml di formalina

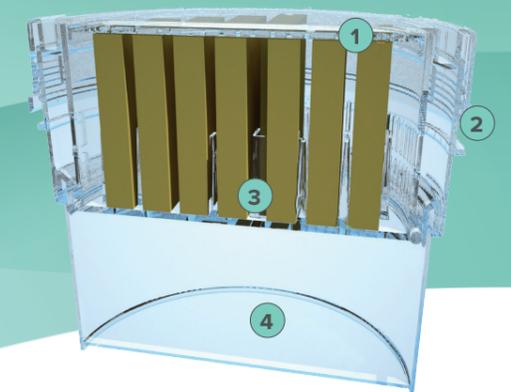

ZERO 500 D | ZERO 500 P

- 1. Coperchio per chiusura** cestello discensore
- 2. Sigillo di sicurezza**
- Il **cestello discensore è preriempito con 115 ml** di tampone fosfato
- 4. Camera ermetica** sigillata contenente 115 ml di formalina

*Il formato **ZERO 500** viene fornito: nella **versione 500D** con il cestello a fondo piatto, per la raccolta di pezzi anatomici.*

*Nella **versione 500P** con il cestello provvisto di apposite guide per il contenimento di 12 cassette organizzate per biopsie prostatiche.*